

**SS WHITE**

Nova Embalagem

**Gesso G4**

GESO ESPECIAL  
PARA TROQUÉIS  
TIPO IV  
MICROGRANULADO

**Cor Salmão**  
Peso Líquido 1Kg

**INDICAÇÕES**

Gesso dental de alta resistência para confecção de troquéis e modelos mestres.

**MODO DE USAR**

O pó deve ser adicionado na proporção de 100g para cerca de 21ml de água.

A pasta deve ser agitada manual ou mecanicamente durante 60 segundos.

O modelo deverá ser separado da impressão após seu endurecimento.

O tempo varia de 30 a 60 minutos.

**Para uso Odontológico**

Não considerado produto para saúde conforme resolução RDC N.º 260, de 23 de setembro de 2002 - Anexo II

ANVISA  
Téc. Resp. Arnildo Kuwer Neto  
CRF RJ 3000  
S.S. White Artigos Dentários Ltda.  
Rua Senador Alencar, 160  
Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ 68.567.650/0001-57  
Indústria Brasileira  
[www.sswhite.com.br](http://www.sswhite.com.br)  
e-mail: [tcientif@sswhite.com.br](mailto:tcientif@sswhite.com.br)

AREA LOTE FABRICAÇÃO



ref. nº 05725

CONSERVAR A EMBALAGEM BEM FECHADA.